

6.95



La solution test de Schalm est utilisée pour détecter les inflammations de la mamelle (mammites) chez les vaches laitières et permet un diagnostic rapide et simple.

Avant utilisation, observer les consignes d'utilisation.

Numéro d'article 29176

#### Mention de danger

Caractéristiques du produit

La solution test de Schalm est utilisée dans l'agriculture pour diagnostiquer les inflammations de la mamelle (mammites) chez les vaches laitières. Le test de Schalm permet de déterminer rapidement et facilement s'il y a un nombre élevé de cellules dans le lait, ce qui peut indiquer une inflammation dans la mamelle.

#### Utilisation :

- Tout d'abord, une petite quantité de lait est versée dans une coupelle de test (art. 69832), qui comporte quatre évidements séparés pour chaque quartier de la mamelle.
- Ensuite, le liquide de test de Schalm est ajouté au lait dans la coupelle de test et bien mélangé.
- Une consistance épaisse et gélantineuse du mélange indique un nombre élevé de cellules, ce qui peut être le signe d'une inflammation de la mamelle.

Le test de Schalm est une méthode rapide pour vérifier la santé de la mamelle et permet de prendre des mesures précoces contre les mammites.

#### Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

3 Images

---

© Landi 2026